



Versio: 2  
Päivämäärä: 7.9.2020  
Vastuukäyttäjät: Katri Tanninen  
Hyväksyjä: Päivi Koistinen, 7.9.2020 13:58

## PUTKIPOSTIKAPSELEIDEN JA PUTKIPOSTIASEMIEN PUHDISTUS

Yksikön laitoshuoltajat suorittavat pesun tarvittaessa tai kerran vuodessa ja kuittaavat putkipostikapseleiden pesun seurantalomakkeeseen

### Päivittäinen pyyhintä:

- Putkipostiaseman koskettelukohtat / etupaneeli pyyhitään päivittäin sekä asemalla olevat putkipostikapselit pinta pyyhitään 1 x pv.

### Pesu:

- Jokainen putkipostikuljetuskapseli on numeroitu
- Putkipostikuljetuskapselit puhdistetaan kerran vuodessa tai tarvittaessa useammin
- Kapseli pestään alle 64 asteisessa dekopesukoneessa (esim. lelu- tai muoviohjelmalla) pesuaineella, jonka pH:n on 5-8
- Kuivaus +40° C:ssa kuumailmakaapissa 2 tuntia, paineilmalla tai nukkaamattomalla pyyhkeellä -> varmistettava, että mustat tiivisteet ovat aivan kuivat, ennekuin palautat kapselit käyttöön
- Eritetahrat poistetaan kapselin pinnalta välittömästi. Jos sisäpuolella on eritteitä, kapseli puhdistetaan huuhtelu- ja desinfektio-laitteessa

### Pesun jälkeen:

- Tarkista kannen lukitusmekanismi. Kannen tulee mennä lokshtaen kiinni kannen runkorakenteen urituksiin
- Kansi ei saa olla vääntynyt eikä haljennut. Jos kansi on viallinen, kapseli otetaan pois käytöstä
- Tarkista läpinäkyvä keskiosa, siinä ei saa olla halkeamia eikä muutenkaan vahingoittunut. Jos keskiosassa on vikaa, kapseli otetaan pois normaalikäytöstä
- Mustat liukurenkaat ovat kuluvia osia ja ne ovat helposti vaihdettavissa. Liukurenkaissa voi olla välillä irronneita lankasäikeitä. Jos liukurengas on selvästi ratkennut saumasta, poista kapseli normaalikäytöstä
- huoltoon menevät kapselit ilmoitetaan yksikön esimiehelle

### Pesun kirjaaminen:

- Pesut ja huollot kirjataan putkipostikapseleiden pesun seurantalomakkeeseen ao. numeron kohdalle